




Terhességi teszt

Rendkívül korai

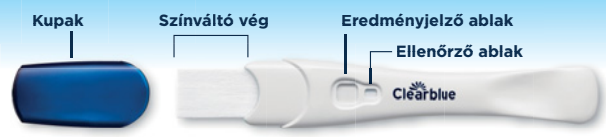

Önvizsgálatra.
A teszt elvégzése előtt figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót.

Teszteljen akár **6 nappal** a kimaradt menstruáció előtt!

Korai tesztelés esetén használja a nap első vizeletét. Ellenkező esetben bármikor tesztelhet.

Ne igyon sok folyadékot a teszt elvégzése előtt.

10 percen belül olvassa le az eredményt **10 perc**

1 A teszt elvégzése

Vegye ki a fóliából, vegye le a kupakot, és azonnal használja fel. Helyezze a színváltó végét:

a vizelet-sugárba **5 másodperc**

vagy

összegyűjtött vizeletmintába **20 másodperc**

FONTOS: merítse be teljesen a színváltó végét az ábrán látható módon

FONTOS: a színváltó vég azonnal rózsaszínre változik, ami azt jelzi, hogy vizeletet szív magába. **Kezdje el az idő mérését, amint látja, hogy a színváltó vég rózsaszínre változik.**

Helyezze vissza a kupakot és fektesse a tesztcsíkot lapos felületre. Ha a színváltó vég nem változik teljesen rózsaszínre, lásd a „Teszthibák” című részt.

2 Várjon

3 perc

Előfordulhat, hogy az ellenőrző ablakban gyorsan megjelenik egy vonal, de **VÁRNIA KELL 3 TELJES PERCET** mielőtt leolvassa az eredményt.

Ha nem jelenik meg kék vonal, lásd a „Teszthibák” című részt.

3 Eredmény

Terhes - ha az eredmény „Terhes”, keresse fel orvosát.



Eredményjelző ablak Ellenőrző ablak

HA KÉT VONALAT LÁT, ÖN TERHES. NEM SZÁMÍT, MENNYIRE HALVÁNYAK VAGY SÖTÉTEK A VONALAK. Ahhoz, hogy az eredmény érvényes legyen, az ellenőrző ablakban egy kék vonalnak kell lennie. Ha nincs, lásd a „Teszthibák” című részt. **FONTOS!** Olvassa le az eredményt a teszt elvégzésétől számított **10 percen** belül. Az ezután bekövetkező változásokat ne vegye figyelembe.

Nem terhes (lásd a 2. kérdést).

Ha nem biztos az eredményben, lásd a 6. kérdést.

? Kérdések és válaszok

- Az eredmény „Terhes”. Mit tegyek?** Keresse fel orvosát, aki tanácsot tud adni a következő lépésekkel kapcsolatban. Előfordulhat, hogy pozitív eredményt kap, és később kiderül, hogy már nem terhes (lásd a 7. kérdést).
- Az eredmény „Nem terhes”. Ez mit jelent?** Lehet, hogy nem terhes vagy a terhességi hormon szintje még nem elég magas ahhoz, hogy kimutatható legyen. Teszteljen újra három nap múlva. Ha ez a vizsgálat „Nem terhes” eredményt ad és késik a menstruációja, keresse fel orvosát.
- Milyen korán lehet tesztelni?** Ez a teszt 6 nappal a kimaradt menstruáció előtt (5 nappal a menstruáció esedékessége előtt) használható. Mivel azonban a hormonszintek eltérőek az egyes nőknél és nagyon alacsonyak is lehetnek a terhesség korai szakaszában, lehet, hogy Ön terhes, de még mindig negatív eredményt kap. Az alábbi táblázat a terhesség korai szakaszában vett vizeletmintákkal végzett laboratóriumi vizsgálatok során kimutatott terhességek százalékos arányát mutatja:

A kimaradt menstruáció előtti napok száma	-1	-2	-3	-4	-5	-6
Kimutatott terhességek aránya	>99%	>99%	>99%	>99%	96%	79%

- Hogyan működik a Clearblue teszt?** A vizeletben kimutatja a hCG (humán koriongonadotropin) terhességi hormont. A teszt érzékenysége 10 mNE/ml. 99% feletti pontosságot mutatott a laboratóriumi tesztekben a menstruáció esedékességének napjától.
- Befolyásolhatja valamilyen gyógyszer vagy betegség az eredményt?** Tesztelés előtt mindig olvassa el az összes Ön által szedett gyógyszerhez mellékelt gyártói használati utasítást. A hCG-t tartalmazó gyógyszerek és bizonyos ritka betegségek hamis pozitív eredményeket okozhatnak. Féltrevezető eredményt okozhat a méhen kívüli terhesség, vagy ha a közelmúltban

- terhes volt, még akkor is, ha nem töltötte ki a terhesség teljes időszakát. Ha Ön a menopauza időszakában vagy ennek közelében van, akkor tévesen kaphat „Terhes” eredményt. A tesztet **NEM** befolyásolhatják a klorofen-észterrel tartalmazó hormonterápiák, az általános fájdalomcsillapítók, az alkohol, az antibiotikumok vagy a fogamzásgátló tabletták. Ha váratlan eredményt kap, beszélje meg orvosával.
- Mit tegyek, ha nem vagyok biztos az eredményben?** Ha a teszt elvégzésétől számított 10 percen belül két kék vonalat lát, Ön terhes, nem számít, mennyire halványak vagy sötétek a vonalak. **„Terhes” eredmények:**
A kép Ez nagyobb valószínűséggel fordul elő, ha a tesztet a várt menstruáció előtt végzi, amikor a hCG szintje viszonylag alacsony lehet.
B kép Ezt akkor láthatja, ha a menstruációja várható napján tesztel, mivel a hCG szintje viszonylag alacsony lehet.
C kép Ezt akkor láthatja, ha több nappal a kimaradt menstruációja után tesztel, mivel a hCG szintje magasabb.
 Ha továbbra sem biztos az eredményben, akkor a teszt megismétlése előtt várjon legalább 3 napot, és gondosan tartsa be az utasításokat.
- Már korábban „Terhes” eredményt kaptam, de elvégeztem újra a tesztet, és most negatív eredményt kaptam, vagy pedig megjött a vérzésem. Ez mit jelent?** Előfordulhat, hogy pozitív eredményt kap, és később kiderül, hogy már nem terhes. Ezt a „terhesség korai elvesztésének” nevezik, ami nem ritka, 4 terhességből körülbelül 1-et érint. A legtöbb nőnek ezután egészséges terhessége lehet.

! Teszthibák

A színváltó vég nem változik teljesen rózsaszínre. Lehet, hogy nem vett fel elég vizeletet. Azonban biztos lehet benne, hogy a teszt működött, ha a kontrollvonala a teszt elvégzésétől számított 10 percen belül megjelenik.
A teszt elvégzésétől számított 10 percen belül nem jelenik meg kék vonal az ellenőrző ablakban. A teszt nem működött, valószínűleg azért, mert túl sok vagy túl kevés vizeletet használt. Végezze el a tesztet újra egy új teszt használatával gondosan követve az utasításokat.



www.clearblue.com

Utasítások a Clearblue rendkívül korai teszthez, a „CB14” felirattal a csomagoláson. Otthoni önvizsgálatra. Kizárólag *in vitro* diagnosztikai használatra. Belsőleg nem használható. Ne használja fel újra. Gyermekektől elzárva tartandó. 2-30 °C között tárolandó. Ha hűtőben tárolta az eszközt, a teszt elvégzése előtt várjon 30 percet, hogy az szobahőmérsékletre melegedjen. Ne használja, ha a fóliacsomagolás sérült. Ne használja a lejáratú időn túl. Használat után dobja a normál háztartási hulladékba. Ne szerelje szét az eszközt. Apró alkatrészeket tartalmaz. Ne egye meg az eszköz egyik részét se. Ha véletlenül lenyeli, kérjen orvosi segítséget. A termék használata által okozott esetleges sérüléseket jelentse a Clearblue vállalatnak.

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Svájc. A Clearblue az SPD védjegye. © 2021 SPD. Minden jog fenntartva.
 Ha termékkel kapcsolatos kérdése van, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatnál az alábbi címen:
 Forgalmazó: MagnaPharm Hungary Kft. 1143 Budapest Gizella ut 42-44, 1.emelet Moha irodaház. Magyarország

LOT	Gyártási tételszám	IVD	<i>In vitro</i> diagnosztikai orvosi eszköz	Gyártó
	Lejáratú dátum		Hőmérséklet-tartomány: 2 °C - 30 °C	Ne használja újra

A terhességi eredmények 79%-a kimutatható 6 nappal a kimaradt menstruáció előtt (5 nappal a menstruáció esedékessége előtt).