

Terhességi teszt Gyors eredmény

- Több mint 99%-os pontosság a menstruációja esedékességének napjától.
- A teszt elvégzése előtt figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót.

1 Mielőtt hozzálát

A teszt elvégzésekor hasznos lehet, ha van Önnel egy óra. A tesztelést bármelyik napszakban elkezdheti a menstruáció esedékességének napjától.

2 A teszt elvégzése

Amikor készen áll a teszt elvégzésére, vegye ki a tesztcsíkot a fóliacsomagolásból, és vegye le a kupakot. Azonnal használja fel a tesztcsíkot. A tesztet végezheti közvetlenül a vizeletsugárban vagy tiszta, száraz tartályba gyűjtött vizeletmintával.

- Tartsa a színváltó véget lefelé mutató helyzetben a vizeletsugárba vagy az összegyűjtött vizeletmintába az ábrán látható módon **5 teljes másodpercig**.
- A színváltó vég ekkor azonnal rózsaszínre vált, ami azt jelzi, hogy vizeletet szív magába.

A színváltó véget 5 másodpercen keresztül folyamatosan a vizeletben kell tartani.



- Tartsa a tesztcsíkot a színváltó végével lefelé mutató helyzetben, vagy fektesse le lapos felületre addig, amíg készen nem áll az eredmény leolvasására, és az ellenőrző ablakban meg nem jelenik a kék csík.
- Ezután visszahelyezheti a kupakot.
- Ha a színváltó vég nem vált teljesen rózsaszínre, olvassa el az 5. kérdést.

5 másodperc

Számoljon 5 másodpercig, amint észreveszi, hogy a színváltó vég rózsaszínre vált.

Vizeletsugár **VAGY** Összegyűjtött minta

3 perc

VÁRJON 3 PERCET.
A teszt működését a kék csík(ok) megjelenése jelzi.

3 Olvassa le az eredményt



Eredményét az eredményjelző ablakban olvashatja le.

A kék csíknak meg kell jelennie az ellenőrző ablakban az eredmény leolvasásakor. A vonal jelzi, hogy a teszt sikeres.

A „Terhes” eredmény 1 percen belül megjelenhet, ha a tesztet a menstruáció kimaradásának első napjától végzi (ami az esedékes menstruáció napját követő nap).

A „Nem Terhes” eredmény megerősítése érdekében várjon 3 teljes percet (lásd a 8. kérdést).

Ha a kék vonal nem jelenik meg az ellenőrző ablakban, akkor a teszt nem működőképes (lásd a 6. kérdést).

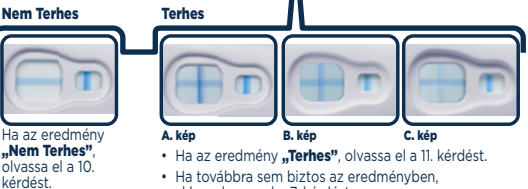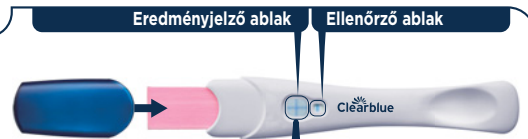

Ha az eredmény „Nem Terhes”, olvassa el a 10. kérdést.

A. kép
• Ha az eredmény „Terhes”, olvassa el a 11. kérdést.

B. kép
• Ha továbbra sem biztos az eredményben, akkor olvassa el a 7. kérdést.

C. kép

Nem számít, ha a „+” szimbólumot alkotó egyik vonal világosabb vagy sötétebb, mint a másik; az eredmény mindenképpen „Terhes”.

FONTOS! A teszt elvégzésétől számított **10 percen** belül olvassa le az eredményt. Az ezután bekövetkező változásokat ne vegye figyelembe.

Kérdések és válaszok

- Milyen pontos a Clearblue teszt?**
Laboratóriumi vizsgálatokban a Clearblue megbízhatósága 99% feletti a menstruáció esedékességének első napja után alkalmazva.
- Hogyan működik a Clearblue teszt?**
Ha Ön terhes, szervezete egy hCG (humán choriogonadotropin) nevű terhességi hormont termel. A terhesség korai szakaszában a szervezet hCG-mennyisége megemelkedik. A Clearblue Gyors eredmény tesztje ezt a hormont már kis mennyiségben is ki tudja mutatni a vizeletből (a vizsgálat érzékenysége 25 mIU/ml).
- Nem tudom biztosan a menstruációm esedékességének napját. Hogyan bizonyosodhatok meg afelől, hogy a tesztet a megfelelő időben végezzem?**
Menstruációja esedékességének meghatározásához számítsa ki a ciklusa szokásos hosszát úgy, hogy megszámlálja a napokat a menstruáció első napjától a következő menstruációjának kezdete előtti napig.
• Ha a havi ciklusa rendszertelen, akkor a teszt elvégzése előtt az utóbbi hónapok leghosszabb ciklusát vegye figyelembe.
Ha az eredmény „Nem Terhes”, de a terhesség gyanúja továbbra is fennáll, akkor olvassa el a 10. kérdést.
- Gyógyszer vagy betegség befolyásolhatja-e az eredményt?**
• A tesztelés kivételése előtt olvassa el az összes Ön által szedett gyógyszerhez mellékelt gyártói használati utasítást.
• A hCG-tartalmú, termékenységet fokozó gyógyszerek félrevezető eredményeket adhatnak. (Ezeket a termékenységet fokozó gyógyszereket általában injekcióval adják be, és ha a beadás után túl hamar végzi el a tesztet, téves „Terhes” eredményt kaphat.)
• A megtermékenyülést elősegítő egyéb kezelések (például a klomifén-citrát), fájdalomcsillapítók és hormonális fogamzásgátlók (például fogamzásgátló tabletták) rendszerint nem befolyásolják az eredményt.
• Ha a hormonális fogamzásgátló alkalmazását nemrég hagyta abba, vagy megtermékenyülést elősegítő terápiában (például klomifén-citrát kezelésben) részesül, akkor lehetséges, hogy menstruációja rendszertelenné válik, ami a teszt túl korai elvégzéséhez vezethet.
• Ha nemrég terhes volt (még ha nem is hordta ki a teljes időtartamot), akkor előfordulhat, hogy téves „Terhes” eredményt kap.
• A méhen kívüli terhesség, petefészekciszta, menopauza és néhány igen ritka betegség is félrevezető eredményt adhat.
• „Terhes” eredmény esetén előfordulhat, hogy a későbbiekben a terhesség korai szakaszában bekövetkező korai természetes vetélés miatt mégsem marad terhes.
Ha váratlan eredményt kap, beszélje meg orvosával.

5 Elvégeztem a terhességi tesztet, de a színváltó vég nem lett teljesen rózsaszín. Mit kell tennem?

Ha a színváltó vég nem színeződik teljesen rózsaszínre, akkor lehetséges, hogy nem itatta át elegendő vizelettel. Azonban ha az ellenőrző ablakban lévő kék vonal a teszt elvégzésétől számított 10 percen belül megjelenik, akkor a teszt működőképes. Ha a teszt elvégzésétől számított 10 percen belül nem jelenik meg a kék vonal az ellenőrző ablakban, akkor olvassa el a 6. kérdést.

- Elvégeztem a tesztet, de az ellenőrző ablakban nem jelent meg a kék vonal. Mit kell tennem?**
Ha a teszt elvégzésétől számított 10 percen belül nem jelenik meg a kék vonal az ellenőrző ablakban, akkor a teszt nem működőképes. Ennek a következő okai lehetnek:
• A színváltó vég nem volt lefelé néző helyzetben, vagy a tesztcsík a vizeletbe mártás után nem lett elfektetve.
• A vizelet túl sok vagy túl kevés volt. A mintavételnek **5 másodpercig kell tartania**.
Ismétlje meg a tesztet új tesztcsíkkal, és gondosan tartsa be az utasításokat. A vizeletmintát akár egy tiszta, száraz tartályba is leveheti, melybe aztán kizárólag a színváltó véget mártja bele csupán 5 másodpercig.
- Mit tegyek, ha nem vagyok biztos az eredményben?**
• A „Terhes” eredményhez az szükséges, hogy a teszt elvégzésétől számított 10 percen belül egy kék csík jelenjen meg az ellenőrző ablakban, illetve egy „+” szimbólum az eredményjelző ablakban. A „+” szimbólum többféleképpen jelenhet meg az eredményjelző ablakban, ám a „+” szimbólumot alkotó vonalaknak és az ellenőrző ablakban lévő csíknak hasonló szélességűnek kell lenniük (lásd az A-C képeket).
A. kép
Ezen kép megjelenése valószínűbb, ha Ön terhes, és a tesztet néhány nappal a kimaradt menstruáció után végzi, ugyanis a hCG-szintek ekkor magasabbak.
B. kép
Ez a kép nem szokatlan, ha Ön terhes, és a tesztet a kimaradt menstruáció napján vagy akár elől végzi, ugyanis a hCG-szintek ekkor még viszonylag alacsonyak.
C. kép
Noha ez a kép halvány, mégis „Terhes” eredményt jelez. Ha továbbra sem biztos az eredményben, akkor a teszt megismétlése előtt várjon legalább 3 napot, és gondosan tartsa be az utasításokat.

A további lépések, információk és a terhességi kapcsolatos általános tanácsok tekintetében keresse fel honlapunkat: www.clearblue.com
Otthoni tesztelésre. Kizárólag *in vitro* diagnosztikai felhasználásra. Nem használható belsőleg. Ne használja fel újra. Gyermekektől elzárva tartandó. 2-30 °C között tárolandó. Ha hűtőben tárolta a készüléket, akkor tesztelés előtt várjon 30 percet, hogy szoba-hőmérsékletre melegedhesen. Ne használja, ha a fóliacsomagolás sérült. Ne használja a lejáratú idon túl. Használat után dobja a normál háztartási (kommunális) hulladékba. Ne szerelje szét az eszközt. Apró alkatrészeket tartalmaz. Ne nyelje le az eszközök egyik részét sem. Ha véletlenül lenyelik valamelyik részét, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.

	Gyártó		Ne használja újra!
	Gyártási szám		<i>In vitro</i> diagnosztikai orvosi eszköz
	Lejáratú dátum		Hőmérséklet-tartomány: 2-30 °C

www.clearblue.com

Forgalmazó: ADPH Kft., H-1092 Budapest, Ráday utca 58. Magyarország

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genf, Svájc. A Clearblue az SPD vállalat védjegye. © 2019 SPD. Minden jog fenntartva.

CE
0123

