



Terhességi teszt

Gyors eredmény

Ez a termék egy nem automatizált, öntesztelésre használható otthoni eszköz, amely a humán choriongonadotropin (hCG) kvalitatív kimutatására szolgál a női vizeletben, terhesség meghatározása céljából. Használata a menstruáció esedékessége előtt 4 nappal kezdődően javasolt.²

1 A teszt elvégzése

Szükséges, de nem biztosított anyagok: Tiszta, száraz tartály és stopperóra. Vegye ki a tesztet a fóliacsomagolásból, vegye le a kupakot, és azonnal használja fel a tesztet.



5 másodperc
a vizeletsugárba



Figyelmeztetések és óvintézkedések
Utmutató az eszközhöz, a csomagolásra nyomtatott „CB11012” felirattal. Otthoni tesztelésre. Kizárólag *in vitro* diagnosztikai felhasználásra. Nem használható belsőleg. Ne használja fel újra. Gyermekektől elzárva tartandó. 2-30 °C között tárolandó. Ha hűtőben tárolta az eszközt, a teszt elvégzése előtt várjon 30 percet, amíg az eléri a szobahőmérsékletet. Ne használja, ha a fóliacsomagolás sérült. A fólia felbontása után azonnal fel kell használni. Ne használja a lejáratú időn túl. Használat után dobja a normál háztartási hulladékba. Apró alkatrészeket tartalmaz. Ne nyelje le az eszköz egyik részét sem. Ha véletlenül lenyeli, forduljon orvoshoz. A termék használata által okozott esetleges sérüléseket jelentse a Clearblue vállalatnak.

Több mint 99%-os pontosság
az esedékes menstruáció első napjától

Könnyen leolvasható eredmények

Ne igyon sok folyadékot
a teszt elvégzése előtt

10 percen belül olvassa le az eredményt

2 Várjon



- A „Terhes” („+”) eredmény 1 percen belül megjelenhet, ha a tesztet a menstruáció kimaradásának napjától végzi (ami az esedékes menstruáció napját követő nap).
- Várjon 3 percet a „Nem Terhes” („-”) eredmény megerősítéséhez. Ha nem jelenik meg kék vonal, lásd a „Hibás teszt” című részt.

3 Eredmény

Terhes - ha az Ön eredménye „Terhes”, keresse fel orvosát
(lásd az 1. kérdést)



Nem Terhes (lásd a 2. kérdést)



Ha nem biztos az eredményben, lásd a 6. kérdést.

Ahhoz, hogy az eredmény érvényes legyen, az ellenőrző ablakban egy kék vonalnak kell lennie. Ha nincs, lásd a „Hibás teszt” című részt. **FONTOS!** Olvassa le az eredményt a teszt elvégzésétől számított **10 percen** belül. Az ezután bekövetkező változásokat ne vegye figyelembe.

? Kérdések és válaszok

- Az eredmény „Terhes”. Mit tegyek?** Forduljon orvosához, aki tanácsot adhat Önnek a további teendőikkel kapcsolatban. Előfordulhat, hogy pozitív eredményt kap, és később kiderül, hogy már nem terhes (lásd a 7. kérdést).
- Az eredmény „Nem Terhes”. Ez mit jelent?** Lehet, hogy nem terhes, vagy a terhességi hormon szintje még nem elég magas ahhoz, hogy kimutatható legyen. Tesztelje újra három nap múlva. Ha ez a vizsgálat „Nem Terhes” eredményt ad, és késik a menstruációja, keresse fel orvosát.
- Nem tudom, mikor esedékes a következő menstruációm. Hogyan bizonyosodhatok meg afelől, hogy a tesztet a megfelelő időben végzem?** Menstruációja esedékességének meghatározásához számítsa ki a ciklusa szokásos hosszát úgy, hogy megszámlálja a napokat a menstruációja első napjától a következő menstruációjának kezdete előtti napig. Ha a havi ciklusa rendszertelen, akkor a teszt elvégzése előtt az utóbbi hónapok leghosszabb ciklusát vegye figyelembe.
- Hogyan működik a Clearblue teszt?** A minta felvitelét követően észleli a hCG-t a vizeletben. Vizuális eredmények több mint 99%-os pontossággal jelzik a hCG jelenlétét a menstruáció esedékességének első napjától.
- Gyógyszer vagy betegség befolyásolhatja-e az eredményt?** Tesztelés előtt mindig olvassa el az összes Ön által szedett gyógyszerhez mellékelt gyártói utasítást. A hCG-t tartalmazó gyógyszerek és bizonyos ritka betegségek alpozitív eredményeket adhatnak. Félrevezető eredményt okozhat a méhen kívüli terhesség, vagy ha a közelmúltban terhes volt, még akkor is, ha nem hordta ki a terhességet. Ha Ön a menopauza időszakában vagy annak közelében van, akkor téves „Terhes” eredményt kaphat, még akkor is, ha nem terhes. A tesztet **NEM** befolyásolhatják a klomifén-citrátot tartalmazó hormonterápiák, az általános fájdalomcsillapítók, az alkohol, az antibiotikumok vagy a fogamzásgátló tabletták. Ha váratlan eredményt kap, forduljon kezelőorvosához.
- Mit tegyek, ha nem vagyok biztos az eredményben?** A „Terhes” eredményhez az szükséges, hogy a teszt elvégzésétől számított 10 percen belül egy kék vonal jelenjen meg az ellenőrző ablakban,

- illetve egy „+” szimbólum az eredményjelző ablakban.
- „Terhes” eredmények**
A kép: Ezen kép megjelenése valószínűbb, ha Ön terhes, és a tesztet néhány nappal a kimaradt menstruáció után végzi, ugyanis a hCG-szintek ekkor magasabbak.
B kép: Ezt akkor láthatja, ha a menstruációja esedékességének első napján, illetve kevéssel előtte vagy utána tesztel, mivel a hCG szintje viszonylag alacsony lehet.
C kép: Ez a kép szintén „Terhes” eredményt jelez.
Nem számít, ha a „+” szimbólumot alkotó vonalak közül az egyik világosabb vagy sötétebb, mint a másik; az eredmény mindenképpen „Terhes”. A „Nem Terhes” eredményhez az szükséges, hogy a teszt elvégzésétől számított 10 percen belül egy kék vonal jelenjen meg az ellenőrző ablakban, illetve egy „-” (negatív előjel) szimbólum az eredményjelző ablakban. Ha továbbra sem biztos az eredményben, akkor a teszt megismétlése előtt várjon legalább 3 napot, és gondosan tartsa be az utasításokat.
- Már korábban „Terhes” eredményt kaptam, de elvégeztem újra a tesztet, és most negatív eredményt kaptam, vagy pedig megjött a vérzésem. Ez mit jelent?** Előfordulhat, hogy pozitív eredményt kap, és később kiderül, hogy már nem terhes. Ezt a nem ritka jelenséget korai vetélésnek nevezik, és 4 terhességből körülbelül 1-et érint. A legtöbb nő későbbi terhesség esetén egészségesen ki tudja hordani a magzatát.
 - Mit tegyek, ha szeretnék teherbe esni?** Érdemes beszélnie az orvosával, mielőtt megpróbál teherbe esni. Számos orvos szerint a folsav vagy prenatális vitaminkészítmény szedése, az alkohol elkerülése, a dohányzás abbahagyása és az egészséges testsúly fenntartására való törekvés előnyös lehet. Érdemes megfontolni az ovulációs teszt használatát is a legtermékenyebb napok meghatározásához. A Clearblue termékcsaládjában a természetes teherbeesés esélyének maximalizálását segítő termékeket is talál.

! Hibás teszt

A színváltó vég nem vált teljesen rózsaszínre. Lehet, hogy nem vitt fel elég vizeletet. Azonban biztos lehet benne, hogy a teszt működött, ha az ellenőrző csík a teszt elvégzésétől számított 10 percen belül megjelenik.

A teszt elvégzésétől számított 10 percen belül nem jelenik meg kék vonal az ellenőrző ablakban. A teszt nem működött, valószínűleg azért, mert a vizelet túl sok vagy túl kevés volt. Végezze el a tesztet újra egy új teszt használatával, gondosan követve az utasításokat.



www.clearblue.com
Teljesítményjellemezők
Klinikai teljesítmény:

A klinikai teljesítményvizsgálat azt mutatta, hogy az eszköz >99%-os pontossággal határozza meg a terhességi állapotot az esedékes menstruáció első napjától.

- Laikus felhasználók által végzett teszt során az eszköz 99%-nál pontosabban állapította meg a terhességet (120 nő által tesztelve).
- Egy 600 mintát tesztelő vizsgálat során az eszköz több mint 99%-ban pontos volt az esedékes menstruáció első napjától számítva.
- A pre-, peri- és postmenopausalis mintákon (600 minta) végzett klinikai specifikációs vizsgálat megerősítette, hogy a specifikitás ≥99%.

IVD	<i>In vitro</i> diagnosztikai orvosi eszköz	LOT	Gyártási szám
	Gyártó		Lejáratú dátum
	Ne használja újra!		Hőmérséklet-tartomány: 2-30 °C
EC REP	Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben		

Analitikai teljesítmény:
Az analitikai specifikációt úgy állapították meg, hogy az eszközt potenciálisan interferáló vagy keresztreakáló anyagokkal tesztelték. Az eredmények megerősítették, hogy ezek magas koncentrációban sem befolyásolják az eszköz teljesítményét. Az eszköz teljesítményét nem befolyásolja a magas szintű hCG béta-core-fragmentum, a nagyon magas szintű ep hCG, a vizelet fajsúlya vagy pH-ja sem. Egy precíziós vizsgálat kimutatta, hogy az eszköz analitikai érzékenysége 25 mIU/ml.

irodalom
SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Svájc.
Forgalmazó: MagnaPharm Hungary Kft., 1119 Budapest, Fehérvári út 97-99., IV. em. Info: Budapest@magnapharm.eu

© 2023 SPD. Minden jog fenntartva.